

Checkliste für die Arztpraxis

Ist Ihr Patient am Eversense 365 CGM System interessiert?

Geben Sie Ihrem Patienten einen Überblick über das Eversense 365 CGM System

- Überreichen Sie die Patientenbroschüre.
- Nennen Sie die **kompatiblen Mobilgeräte**.
- Nennen Sie die Kontraindikationen.
- Sprechen Sie über die **Kalibrierung** mit einem CONTOUR® Blutzuckermessgerät.
- Stellen Sie die wichtigsten Vorteile des Eversense 365 CGM Systems vor:
- Langzeit-Sensor, der 365 Tage hält
- Abnehmbarer Smart Transmitter mit Vibrationsalarmen am Körper
- Messgenauigkeit
- Hautfreundliches Silikon-Pflaster

Das Eversense CGM System verordnen (ggf. Musterrezept beachten)

- Überreichen Sie dem Patienten den Eversense Patientenflyer.

Vorbereitung des Insertionstermins

Terminvereinbarung und Vorbereitung

- Insertionstermin (sobald die Kostenübernahme der Krankenkasse vorliegt).
- Ein Mitarbeiter des **Eversense Teams im Ascensia Diabetes Service** vereinbart den Termin für die technische Einweisung des Patienten.
- Patient sollte vor der technischen Einweisung die Eversense App herunterladen und ggf. ein Konto erstellen.
- Das Eversense CGM System wird Ihnen von einem der Diabetes Fachhändler rechtzeitig (ca. 5 Tage) vor dem Insertions-termin geliefert.

Handhabung des gelieferten Zubehörs

- Stellen Sie sicher, dass die Lieferung vollständig ist:
- Eversense Sensor und Transmitter
- Eversense Insertion Tools Kit
- Kit zum Einsetzen und Entfernen von Sensoren (Sensor insertion and removal Kit)
- Pflaster Kit
- Lagern Sie den **Eversense Sensor** ab Eintreffen in der Praxis im **Kühlschrank**.
- Überprüfen Sie die Verfallsdaten des gesamten Zubehörs.

Falls Sie die technische Einweisung selbst durchführen:


- Verwenden Sie für die Einweisung die bereitgestellte Präsentation „Technische Einweisung“.
- Füllen Sie das "Protokoll zur technischen Einweisung des Patienten" aus und senden es an: **Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH**
Marie-Curie-Straße 5
51377 Leverkusen.
- Übergeben Sie die Begrüßungsmappe. Diese enthält wichtige Informationen für den Start mit dem Eversense 365 CGM System.

Am Tag der Insertion des Eversense CGM Systems

- Verbinden Sie den Sensor mit dem Smart Transmitter/Mobilgerät. Beachten Sie hierzu ggf. die Unterlage: „Verbindungs-Tipps“.
- Geben Sie dem Patienten Pflaster, Transmitter und Zubehör.
- Ggf. Anweisungen zum Synchronisieren der Patientendaten mit der Arztpraxis bereitstellen.

Das Eversense 365 CGM System ist eingerichtet

- Aushändigen der Begrüßungsmappe von Ascensia Diabetes Care
- Zusätzliche Informationen unter **eversenseCGM.com**

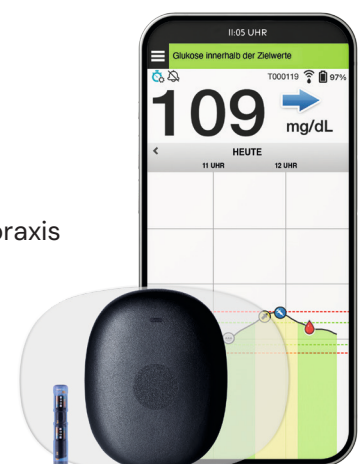

Checkliste für die Arztpraxis



Einsetzbesteck (Insertion Tools Kit)

- Inhalt: Einschnitt-Schablone und Instrumente zum Einsetzen
- Überprüfen Sie die Verfallsdaten.
- Mit jedem bestellten Sensor wird automatisch 1 Kit mitgeliefert.



Eversense-Sensor-Kit

- Kit muss umgehend im Kühlschrank gelagert werden
- Überprüfen Sie die Verfallsdaten.
- 1 Kit pro Patient; je ein Implantationsausweis enthalten



Kit mit Smart Transmitter

- Inhalt: Ladekabel, Adapter für Wandsteckdose und Benutzerhandbuch
- Laden Sie den Smart Transmitter am Tag des Einsetzens auf.
- 1 Kit je Jahresverordnung



Pflaster-Kit

- 300 weiße und 90 transparente Pflaster (insgesamt 390 Pflaster)
- Überprüfen Sie die Verfallsdaten.



Kundenspezifisches Eingriffs-Kit (Procedure Kit / „Sensor insertion and removal kit“)

- Inhalt: Unsterile und sterile Artikel
- Folgendes ist NICHT enthalten: sterile Handschuhe, Lidocain, Desinfektionsmittel entsprechend des Hygieneplans, Entsorgungsbox