

Wundversorgung des Einschnitts

- Schwimme mindestens 5 Tage lang nicht und tauche die Einschnittsstelle in dieser Zeit in der Badewanne nicht ins Wasser. Duschen ist in Ordnung, vermeide aber den direkten Wasserstrahl auf die Einschnittsstelle.
- Das Tegaderm™ sollte mindestens fünf Tage getragen werden. Wenn es sich vorher ablöst, ersetze es. Achte besonders darauf, dass Du die Steri-Strips™ nicht abreißt, wenn Du das Tegaderm™ entfernst.
- Vermeide anstrengende Aktivitäten, durch die ein Zug an der Schnittwunde entstehen könnte oder die starkes Schwitzen verursachen können.
- Lasse die Steri-Strips™ auf der Einschnittsstelle, bis sie abfallen.



Benachrichtige Deinen Arzt, wenn:

- Die Steri-Strips™ sich ablösen, bevor der Einschnitt vollständig verheilt ist.
- Du Fieber bekommst oder Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Wärme oder Ausfluss an der Einschnittsstelle feststellst.

Lies den Abschnitt *Vorteile und Risiken* im Benutzerhandbuch für das Eversense 365 CGM System gründlich durch.

1 Tag 1: Erste Schritte

- Lies das beiliegende Benutzerhandbuch für Eversense 365 und die Kurzanleitung.
- Lade die Eversense App herunter und kopple den Smart Transmitter mit Deinem Mobilgerät.
- Verbinde den Sensor mit dem Smart Transmitter und beginne die 24-stündige Aufwärmphase.
- Gib die mit Deinem Diabetesteam besprochenen und vorgegebenen Einstellungen ein.
- Schalte den Transmitter aus. Du musst ihn erst tragen, wenn die Initialisierungsphase beginnt.

2 Tag 2: Beginn der Initialisierungsphase

- Setze den Transmitter mit Hilfe der Platzierungshilfe auf das Eversense Pflaster und positioniere ihn über dem Sensor, wo das Signal am stärksten ist.
- Schließe die 4 Initialisierungskalibrierungen ab. Kalibrierungen können alle 2 Stunden durchgeführt werden, Du musst aber alle 4 Kalibrierungen innerhalb von 36 Stunden durchführen.
- Nach der 2. erfolgreichen Kalibrierung kannst Du Deine Glukosedaten sehen.

3 Tag 3 und darüber hinaus: Trage den Transmitter jeden Tag.

- Die tägliche Kalibrierungsphase beginnt.
- Ab Tag 14 musst Du nur noch einmal in der Woche kalibrieren.