

Single-Let[®], die sterile Einmal-Sicherheitslanzette

Die Vorteile von Single-Let[®]:

- **SICHERHEIT**

TRBA250 konforme Sicherheitslanzette. Sowohl Sie als auch Ihre Patienten sind vor versehentlichen Nadelstichverletzungen geschützt

- **KOMFORT**

Die silikonbeschichtete 28-Gauge-Nadel und die feste Einstichtiefe von 1,6 mm sorgen für zusätzlichen Patientenkomfort

- **ANWENDERFREUNDLICHKEIT**

Einfache Bedienung in nur 2 Schritten: drehen und drücken (siehe Rückseite)

Ergonomische T-Form für **sicheren Halt** beim Tragen von Handschuhen

Gamma-sterilisierte **28-Gauge-Nadel**

Kontrollierte Punktion (1,6 mm Einstichtiefe)

Auslöseknopf


Die Nadel wird **automatisch zurückgezogen und arretiert**, um eine Wiederverwendung auszuschließen

Die geriffelte Schutzkappe garantiert eine sterile Nadel und sorgt für **festen Halt beim Abdrehen**

PZN 13599889

Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Produktgröße

Single-Let®: Bedienung in nur 2 einfachen Schritten

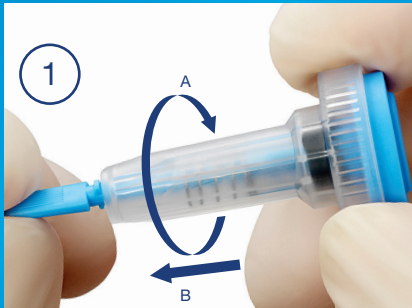

1
Schutzkappe **abdrehen** (A)
und dann gerade **abziehen** (B).



2
An der gewünschten Einstich-
stelle positionieren und den
Auslöseknopf **drücken** (C).

ACHTUNG: Nur für die Entnahme von Blutproben aus den Fingern verwenden.



Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Produktgröße

Ascensia Diabetes Service:
0800 / 50 88 822 (kostenfrei)
info@ascensia.de | www.diabetes.ascensia.de

Für weitere Informationen zu Single-Let® und den CONTOUR® NEXT Blutzuckermesssystemen wenden Sie sich bitte an Ihre/n Außendienstmitarbeiter/-in von Ascensia Diabetes Care oder besuchen Sie unsere Website: www.diabetes.ascensia.de
Ascensia, das Ascensia Diabetes Care Logo, Contour und Single-Let sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Holdings AG. © 2017


ASCENSIA
Diabetes Care